





1. Auftrag

Füllen Sie bitte den beiliegenden Auftrag zur DNA-Analyse sorgfältig und gut lesbar mit einem Kugelschreiber aus. Lesen Sie sich die Einverständniserklärung gründlich durch und lassen Sie diese von allen Testpersonen bzw. den gesetzlichen Vertretern unterschreiben.

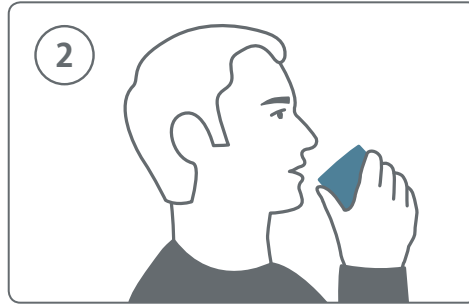

2. Vorbereitung: Spülen

Alle am Test beteiligten Personen spülen sich den Mund gründlich mit klarem Wasser aus. Bitte keine Zahnpasta benutzen!
Bei Kindern, die gestillt werden:
Nach dem letzten Stillen bitte 2 Stunden mit der Probennahme warten.

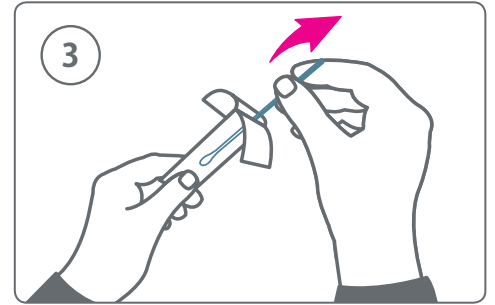


3. Vorbereitung: Wattestäbchen

Legen Sie für jede Person ein Probenkuvert bereit. Ziehen Sie das Wattestäbchen aus dem Kuvert und reißen Sie vorsichtig die Schutzfolie auf.


Fragen? – Rufen Sie uns an unter Telefon +49 (0) 3 41 / 149 59 10 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.resultan.de

Ihr
Testergebnis
finden Sie unter
www.resultan.de

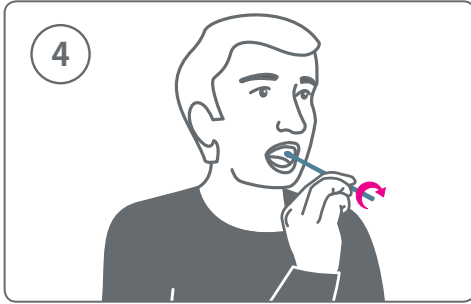


4. Probennahme

Verwenden Sie pro Person ein Wattestäbchen. Berühren Sie die Wattestäbchen nur am Griffbereich und streichen Sie bei jeder Person 5 mal drehend an der Wangeninnenseite auf und ab.

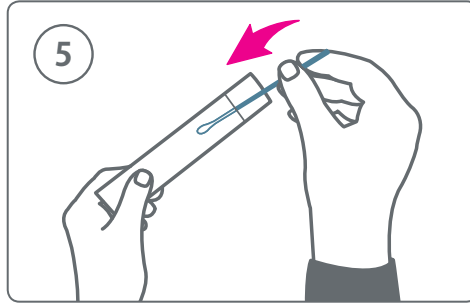

5. Eintüten

Stecken Sie bitte jedes Wattestäbchen einzeln (ohne Folie) in das entsprechend beschriftete Probenkuvert (Nicht verwechseln!). Legen Sie die Kuverts sowie die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare in die Testbox. Anschließend versiegeln Sie den Karton mit dem beiliegenden Sicherheitssiegel.

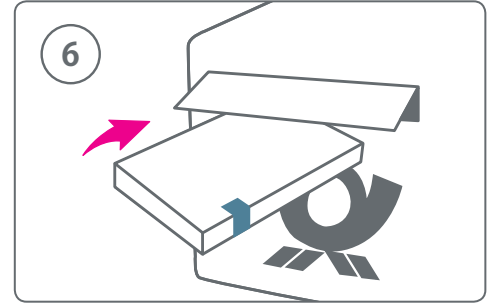

6. Versand

Senden Sie die Testbox versiegelt an uns zurück. 10 Tage nach Zahlungs- und Probeneingang können Sie Ihr Testergebnis online unter www.resultan.de oder per Telefon +49 (0) 3 41 / 149 59 10 (Zugangscode siehe beiliegende Codekarte) abrufen. Schriftliches Ergebnis? -> Briefpost auf Auftrag ankreuzen.