



1. Auftrag

Füllen Sie bitte den beiliegenden Auftrag zur DNA-Analyse sorgfältig und gut lesbar mit einem Kugelschreiber aus.

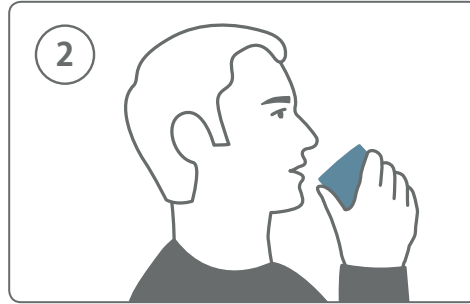

2. Vorbereitung: Spülen

Alle am Test beteiligten Personen spülen sich den Mund gründlich mit klarem Wasser aus. Bitte keine Zahnpasta benutzen!
Bei Kindern, die gestillt werden: Nach dem letzten Stillen bitte 2 Stunden mit der Probenahme warten.

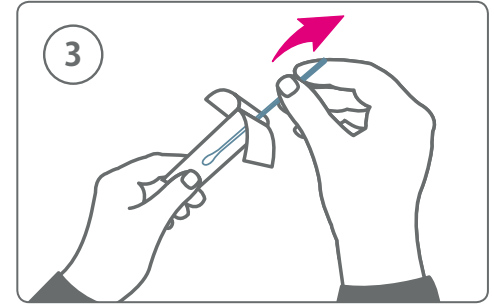


3. Vorbereitung: Wattestäbchen

Legen Sie für jede Person ein Probenkuvert bereit. Ziehen Sie das Wattestäbchen aus dem Kuvert und reißen Sie vorsichtig die Schutzfolie auf.


Fragen? – Rufen Sie uns an unter Telefon +49 (0) 3 41 / 149 59 10 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.resultan.de

Ihr
Testergebnis
finden Sie unter
www.resultan.de

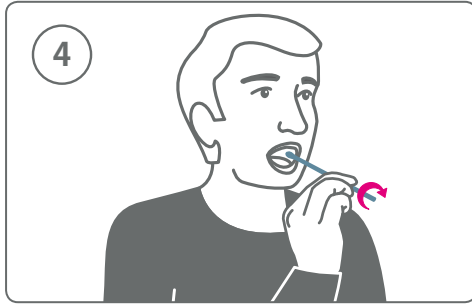


4. Probennahme

Verwenden Sie pro Person ein Wattestäbchen. Berühren Sie die Wattestäbchen nur am Griffbereich und streichen Sie bei jeder Person 5 mal drehend an der Wangeninnenseite auf und ab.

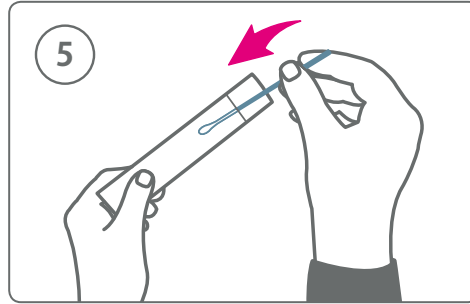

5. Eintüten

Stecken Sie bitte jedes Wattestäbchen einzeln in das entsprechend beschriftete Probenkuvert (Nicht verwechseln!). Legen Sie die Kuverts sowie die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare in die Testbox. Anschließend versiegeln Sie den Karton mit dem beiliegenden Sicherheitsiegel.

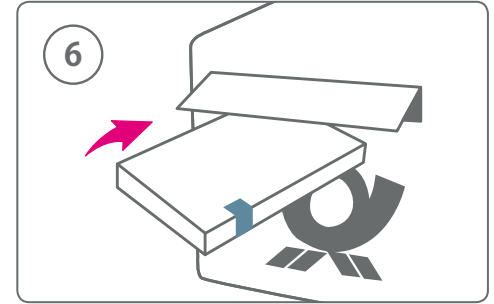

6. Versand

Senden Sie die Testbox versiegelt an uns zurück. Nach 10 Tagen können Sie Ihr Testergebnis abrufen: www.resultan.de oder Telefon +49 (0) 3 41 / 149 59 10 (Zugangscode siehe beiliegende Codekarte).