

DNA-Vaterschaftstest von Resultan **SO EINFACH GEHT'S.**



1 Gebrauchsanleitung und Checkliste gründlich lesen



2 Führen Sie die Probennahme beim sachkundigen Zeugen mit den beiliegenden Wattestäbchen durch.

Zeugen: Arzt, Anwalt, Behörde, Apotheke



3 Überweisen Sie den Analysebetrag, falls Sie noch nicht gezahlt haben, bitte auf folgendes Konto:

GENOLYTIC GmbH, HypoVereinsbank,
IBAN: DE62 86020086 0021638340,
BIC/SWIFT: HYVEDEMM495



4 Codekarte unbedingt aufbewahren

Nur mit Testnummer und Passwort erhalten Sie Auskunft per Telefon: 0341 / 149 59 10 oder im Internet auf www.vaterschaftstest-resultan.de



5 Proben durch den Zeugen in der Testbox versiegelt einsenden

(in Deutschland portofrei)



Unsere Resultan Ersatzformulare können Sie auf unserer Website www.vaterschaftstest-resultan.de herunterladen.

Eventuell anfallende Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Probennahme unter Aufsicht eines sachkundigen Zeugen müssen selbst getragen werden.

Resultan ist eine Marke der GENOLYTIC GmbH

GENOLYTIC GmbH

Deutscher Platz 5 | 04103 Leipzig | Deutschland
www.vaterschaftstest-resultan.de | Tel.: 0341 / 149 59 10

