





1. AUFTRAG

Beiliegende Dokumente sorgfältig durchlesen und gut lesbar mit einem Kugelschreiber ausfüllen. Formulare von allen Testpersonen bzw. gesetzlichen Vertretern (i.d.R. Vater und Mutter) unterschreiben lassen. Fotos der Testpersonen beilegen.

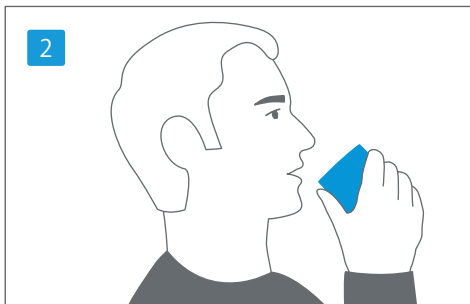


2. VORBEREITUNG: SPÜLEN

Mundraum muss frei von Speiseresten sein – evtl. mit klarem Wasser spülen. Bitte keine Zahnpasta benutzen! Bei Kindern, die gestillt werden: Nach dem letzten Stillen bitte 2 Stunden mit der Probenahme warten.

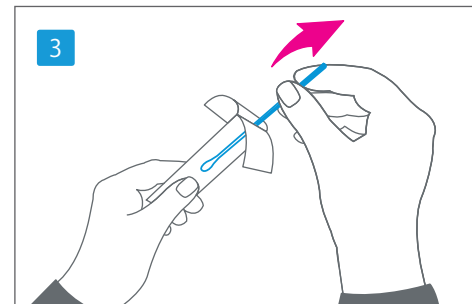


3. VORBEREITUNG: WATTSTÄBCHEN

Legen Sie für jede Person ein Probenkuvert bereit. Ziehen Sie die Wattestäbchen aus dem Kuvert und reißen Sie vorsichtig die Schutzfolie auf. Pro Person 1 Probenkuvert und 2 Wattestäbchen.

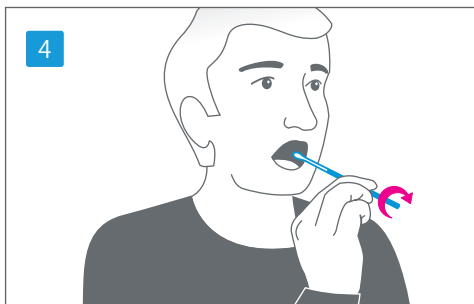


4. PROBENNAHME

Probenahme vor den Augen des Zeugen. Verwenden Sie pro Person 2 Wattestäbchen. Berühren Sie die Wattestäbchen nur am Griffbereich und streichen Sie bei jeder Person 5 mal drehend an der Wangeninnenseite auf und ab.

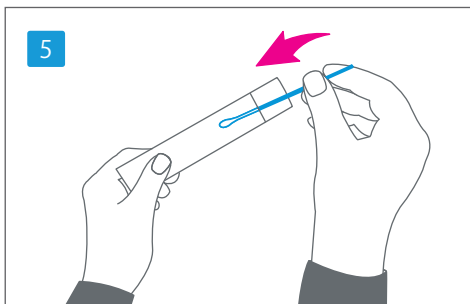

5. EINTÜTEN

Stecken Sie beide Wattestäbchen einer Person (ohne Folie) in das entsprechende Probenkuvert (Nicht verwechseln!). Legen Sie die Kuverts sowie die ausgefüllten, unterschriebenen Formulare in die Testbox. Anschließend versiegeln Sie die Testbox mit dem beiliegenden Sicherheitssiegel.

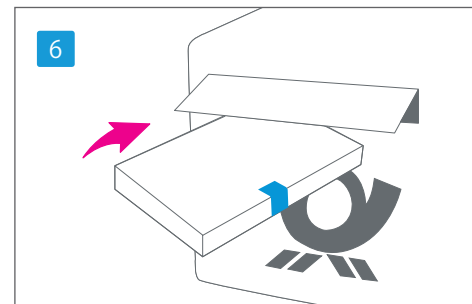

6. VERSAND

Versand der versiegelten Testbox durch den Zeugen (Arzt, Anwalt, Behörde, Apotheke) an die GENOLYTIC GmbH. Wenige Tage nach Zahlungs- und Probeneingang erhalten Sie Ihr Testergebnis online unter www.vaterschaftstest-resultan.de. Zugangsdaten siehe Codekarte. Adresse für das schriftliche Testergebnis auf dem Identitätsnachweisformular angeben.

